


Kodning af program P1 og P2

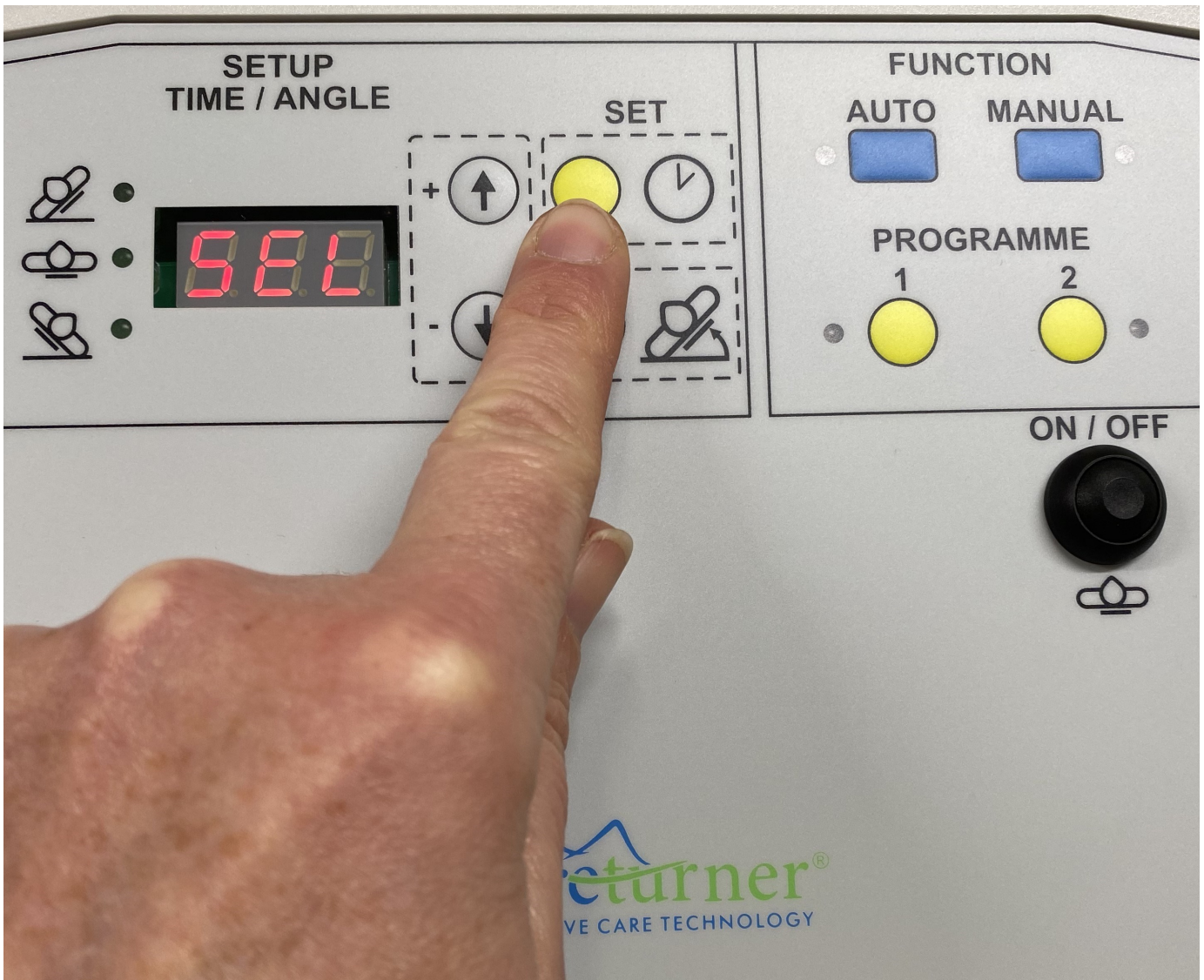

Denne vejledning viser hvordan du koder program P1 og P2, de individuelt indstillede programmer.


Able nordic A/S

+45 86 98 24 99 - kr@ablenordic.dk - www.ablenordic.dk

Kodning af P1 og P2 består af 3 trin




Tryk i 3 sek. på SET tid knap til SEL (select) vises i display.

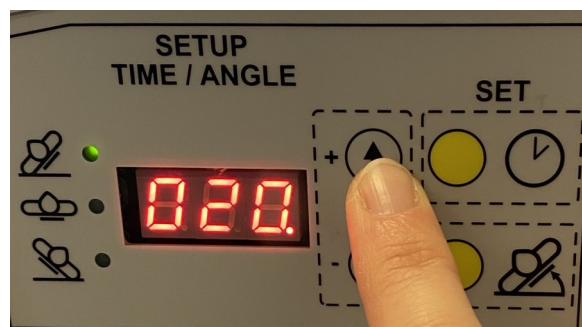

Indstil den ønskede tid højre vinge skal være hævet på pil op/ned.

Vælges værdien "0" vil højre vinge ikke hæve og aflaste højre side.

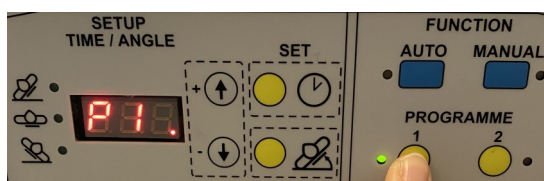

Vælg det program der skal kodes.

Tryk i 3 sek. på enten P1 eller P2.

Det valgte program vises i display.




Bekræft tiden på højre side ved at trykke på SET tid knap.

Diode skifter til midten/rygliggende.

Trin 1: Tidsindstilling—tiden på hver side inden de skifter position.



Tryk på SET tid knap—diode lyser for højre sides vinger. (vinger hæves i højre side = aflastning i højre side, tyngden flyttes mod venstre side)

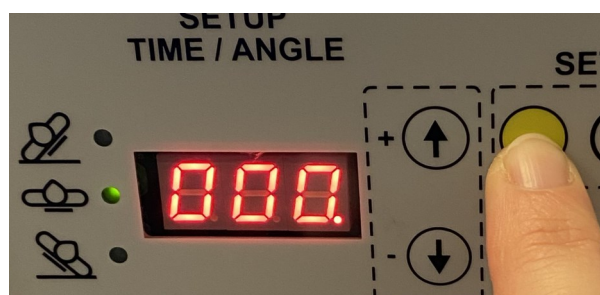

Indstil den ønskede tid i rygliggende på pil op/ned.

Vælges værdien "0" vil programmet springe over rygliggende position og kun skifte fra side til side.

Bekræft tiden i midten/rygliggende ved at trykke på SET tid knappen.


Kodning af P1 og P2 består af 3 trin



Diode skifter til venstre sides vinger.
(vinger løftes i venstre side = aflastning i venstre side, tyngden flyttes mod højre side).

Indstil den ønskede tid venstre vinge skal være hævet på pil op /ned.

Vælges værdien "0" vil venstre vinge ikke hæve og aflaste venstre side.

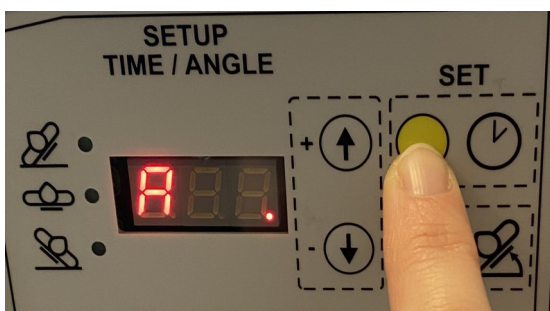


Bekræft tiden for venstre side ved at trykke på SET tid knap

Der lyder 1 Bip. Tiden for alle 3 positioner er nu færdigindstillet

Display viser A = Angle/Vinkel.


Trin 2: indstilling af vinkler på højeste og laveste vinge.

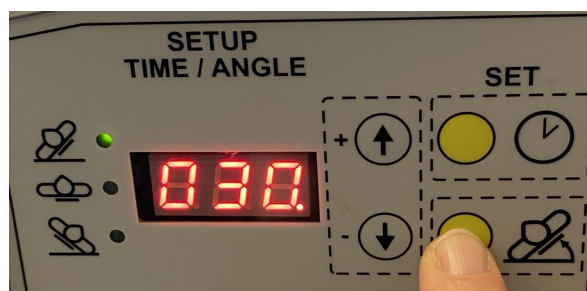

Tryk på SET vinkel knap, diode lyser i øverste = højeste vinge.


Indstil vinklen på højeste vinge mellem 0-40 grader med pil op/ned.

Bekræft ved at trykke på SET vinkel knap.

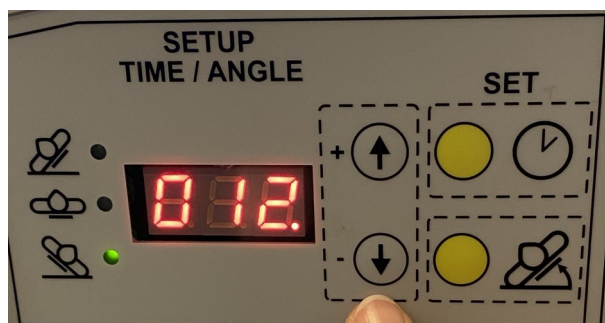

Diode lyser nederst = laveste vinge/modhold.

Indstil vinklen på laveste vinge/modholdet mellem 0-12 grader på pil op/ned.

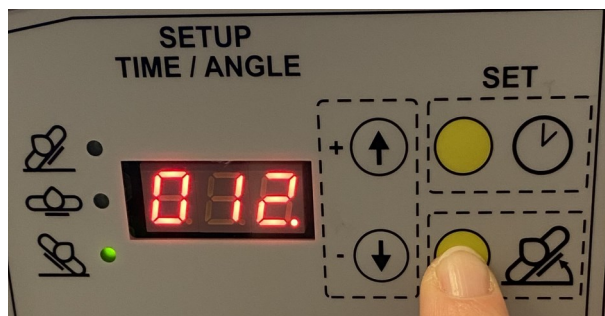

Bekræft vinklen for laveste vinge/modhold ved at trykke på SET vinkel knap


Der lyder 2 Bip. Vinkler for højeste og laveste vinge er nu færdigindstillet.

Display viser SEL

Kodning af P1 og P2 består af 3 trin

OBS:

Gradtallet/vinkler på de to siders vinger bliver spejlet. Dvs når højre vinge hæves 30 gr og venstre vinge 12 gr, vil venstre vinge gå 30 gr op og højre 12 gr når Careturner skifter side efter det tidsinterval der er valgt mellem stillingsskift.

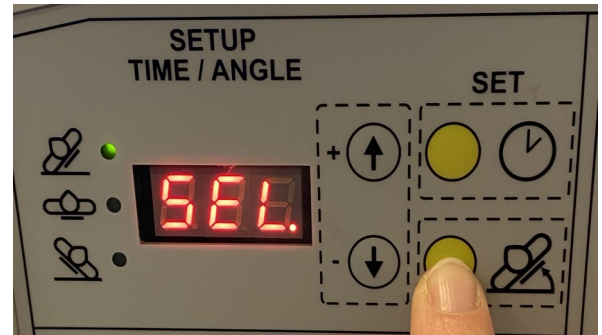

Bekræft ved at trykke på SET vinkel knap.

Der lyder 3 bip. Hele det valgte program er nu færdig kodet og gemt.

Trin 3: Vælg hvilken position Careturner skal starte i.



Vælg på pil op/ned om det er højre, rygliggende eller venstre side Careturner skal starte på.

Hvis rygliggende er valgt som startposition, vil Careturner først starte med at skifte position, når tiden for rygliggende valgt i trin 1 er gået.

For at starte et program, tryk på P1/P2 i 3 sek. til det vises i display.



Dette product er CE-mærket i overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr MDR 2017/745 klasse 1.

