

**Op at sidde på sengekant med brug af Careturner.**




Denne vejledning viser et forslag til hvordan du med brug af Careturners manuelle funktioner kan hjælpe en person op at sidde på sengekanten.

Able nordic A/S

+45 86 98 24 99 - [kr@ablenordic.dk](mailto:kr@ablenordic.dk) - [www.ablenordic.dk](http://www.ablenordic.dk)

# Op at sidde på sengekant

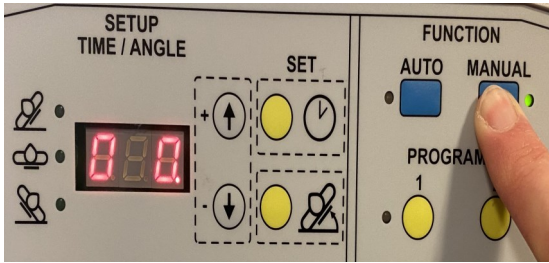

Aktiver manuel funktion og håndkontrol: tryk 3 sek. på manuel knap til diode lyser grønt.

Eller:

Hvis program P1 eller P2 er aktiveret, kan manuel/pausefunktion også aktiveres ved at trykke på SET tid knappen.



Udgangstillingen er enten på ryggen eller siden med hovedgærdet eleveret.




**Sikkerhed:** Reducer risiko for at personen kan glide ud over sengekanten.

Tryk begge pile op ca. 10 grader.



Fortsæt med at trykke pil op modsat den side personen skal ud til, så der laves et "ryglæn".

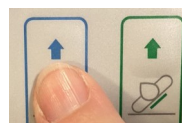

## Op at sidde på sengekant



Mens der trykkes pil op, flytter personen benene ud over sengekanten.

Hvis benene er tunge, så placeres evt. noget glidemateriale under.



For at komme helt op at sidde, bed personen om at skubbe fra i madrassens hovedgærde og "ryglæn".



Når personen sidder helt op, sænkes vingen under benene—tryk pil ned.

Personen er nu klar til at rejse sig.



Dette product er CE-mæket i overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr MDR 2017/745 klasse 1.

