

Vending til sideleje med Careturner og et løst glidestykke, hvor personen kan hjælpe til.




Denne vejledning viser et forslag til hvordan du med brug af Careturners manuelle funktioner og et stykke løst glidestykke, kan vende en aktiv person til sideleje, der kan hjælpe helt eller delvist til med den ene sides arm/ben.

Able nordic A/S

+45 86 98 24 99 - kr@ablenordic.dk - www.ablenordic.dk

Vending til sideleje med løst glidestykke, hvor personen kan hjælpe til.

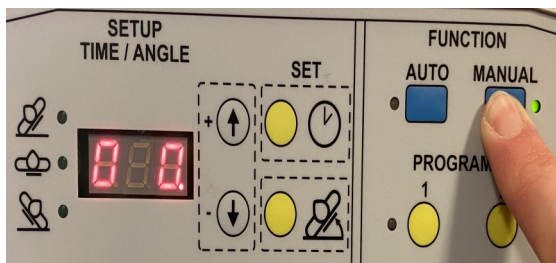

Aktiver manuel funktion og håndkontrol: tryk 3 sek. på manuel knap til diode lyser grønt.

Eller:

Hvis program P1 eller P2 er aktiveret, kan manuel/pausefunktion også aktiveres ved at trykke på SET tid knappen.

Placering af glid i den side hvor personen skal vende til.

Personen ligger i midten af sengen, med arm krydset over og ben bøjet/krydset.

Tryk på "smartknap" i den side du står på.

Grøn= højre



Blå= venstre



Kør op til der er luft ned bag ryggen.

Personen hjælper evt. til ved at tage fat i sengehesten.

Placer et stykket foldet glide stykke ned, til lidt over midten, bag ryggen og bagdel.



Tryk pil ned og sænk siden du har placeret gliddet på, til ca. 10 grader. Det giver en lille bakke personens ben kan glide rundt på.



Vending til sideleje med løst glidestykke, hvor personen kan hjælpe til.




Bed personen om at bøje benet og tage fat i sengehesten og trække/vende sig rundt og flytte bagdelen tilbage i sengen.

Sænk vingen helt.



Ved vending tilbage til ryggen. Tryk begge pile op og hæv begge vinger til ca. 20 grader Det giver en lille vugge personen kan glide rundt i.

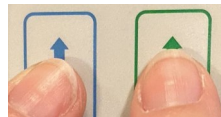

Bed personen om at strække øverste ben og arm og kigge til den side der skal vendes til.



Personen glider tilbage til rygliggende.

Ved behov for vending til modsat side, gentages proceduren forfra.



Dette product er CE-mærket i overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr MDR 2017/745 klasse 1.

